

超音波吸入器 のどミスト

取扱説明書

型式番号 NK8020

家庭用

このたびは「のどミスト」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に右の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は、「お買い上げ日」などの記入を必ずお確かめいただき、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用
保証書付き

Printed in Japan



安全上のご注意 ～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- 危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 - 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 - 注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)
- してはいけない内容です。
 - 実行しなければならない内容です。

警告	
	●呼吸器に疾患のある人、耳鼻咽喉に疾患のある人、ゼンソクの人、または医師の治療を受けているときや、身体に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ使用する。守らないと体調不良をおこすおそれがあります。
	●自分で意思表示できない人または、自分で操作できない人には使用させない。ケガをするおそれがあります。
	●不安定な場所に置いたり保管しない。事故や水漏れ、故障の原因になります。
	●ノズル穴やすき間にピンや針金などの異物をいれない。異常動作してケガをするおそれがあります。
	●本体を水につけたり、水をかけたりしない。故障のおそれがあります。
	●絶対に分解したり修理・改造はしない。事故やトラブル、故障のおそれがあります。

各部の名前

商品をご確認ください



使用目的又は効果

鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用する。

乾電池について

- 単4形アルカリ乾電池または充電電池2本を使用してください。
 - アルカリ乾電池以外の乾電池も使用できますが、種類によっては使用可能回数が少なくなる場合があります。
 - 室温が低いと電池の使用可能回数が少なくなる場合があります。
 - 単4形アルカリ乾電池2本で約90回使用できます。(1回に1分間使用)
 - 電池のなかには新品でも電圧が低いものがありますので、使用回数が少なくなる場合があります。
 - タンクに水が入っていても噴霧しない場合は、2本同時に新しい電池に取り換えてください。
 - 長期間(約3ヶ月以上)使用しない場合や、消耗した電池は必ず外してください。
 - 液漏れにより故障するおそれがあります。
 - 乾電池は必ず、1年に1回はお取り換えください。
 - 液漏れにより故障するおそれがあります。
- ※電池の液漏れによる汚損、故障は無料修理の対象外です。

お使いになる前に

- 給水タンクやノズル穴等が清浄であることを確認し、そうでない場合は清浄してください。
- しばらく使わなかったときは、電池の漏液やノズル穴の詰まり等がなく、正常かつ安全に動作することを確認してください。

保証書

販売名	超音波吸入器 NK8020
保証期間	お買い上げより5年間
お買い上げ	年 月 日
お客様	〒□□□□-□□□□ ご住所
	お名前 様
	お電話 ()
販売店	住所・店名
	電話 ()

本品は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照下さい。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。



NIKKO SEIKI CO.,LTD.

日光精器株式会社

〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町2660
TEL(0120)250-846 (フリーダイヤル) / FAX(0748)37-2015

注意

- のどや鼻に異常を感じた場合や気分が悪くなるなどの異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- 使用しても効果があらわれない場合は、医師又は専門家に相談する。☆体調不良をおこすおそれがあります。
- 吸入に使用する水は常に新しい水道水を使用し、常に機器を清潔にして使用する。☆カビや細菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また、悪臭や故障の原因になります。
- 必ず毎回新しい水道水を使用し、使用前に新しい水が出るまで5秒間噴霧させてから使用する。また、給水タンクの残水は必ず捨てる。☆カビや細菌が繁殖し、体調不良をおこすおそれがあります
- お子様がご使用の際は、大人の方が付き添い目を離さない。☆事故やケガ、体調不良をおこすおそれがあります。
- お湯(40℃以上)は使用しない。☆事故や故障のおそれがあります。
- 薬液・薬液・食塩水・重曹水は使用しない。☆体調不良や故障のおそれがあります。
- 吸引以外の目的で使用しない。
- ほこり、ちり、湿気の多い場所での使用や保管はしない。☆事故やトラブル、故障の原因になります。
- 他の治療器と同時に使用しない。☆事故や体調をくずすおそれがあります。
- 本体・タンクキャップ・電池キャップ・電池は、幼児の手の届く所に置いたり保管したりしない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。☆事故のおそれがあります。
- ノズル穴をのぞいたり、目などを近づけない。☆ケガをするおそれがあります。

1 電池の入れ方

お手数ですが付属の乾電池2本を入れてください。



注意

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池の⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り外す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り外しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

2 給水のしかた

- 水は6mL(2分半～5分の噴霧量)入ります。
- ※水を長時間入れっぱなしにしておくと、まれに雑菌が発生することがあります。
- “つねに新鮮な水道水を補給する”ようにしてください。


薬剤・薬液・食塩水・重曹水は使用できません。必ず水道水をお使いください。



- 給水はタンク内側の線(給水ライン)まで入れてください。※それ以上は溢れて故障する恐れがあります。
- 上部フタを取りつける(時計回り) ※しっかり止まるまで。

3 使いかた

下記写真のようにスイッチを下におろすとONになってミストが噴射されます。

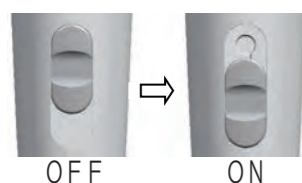

※使う前に、正常に動作することを確認してください。

噴霧開始直後は、本体に残っていた古い水が噴霧される場合があります。これが口や鼻に入らないよう5秒間ほど噴霧してから使用してください。



- 1 ノズル穴を口または鼻に近づけて、スイッチをONにするこの時本体を傾けすぎると、ミストが出なくなることがあります。
- 2 ゆっくりとミストを吸い込む

●1回につき約30秒～1分程度が使用の目安です。


初めてお使いの場合

- ・ミストは深く吸い込むことで喉頭部に達します。
- ・初めての人は慣れるまでむせることがあります。
- ・「ゆっくり吸って口をとじ、飲み込む」をくり返すとむせにくくなります。
- ・お客様の場合は、口からこぶし1個分(約8cm)程度離してください。

4 上手な吸入のしかた


ゆっくりとした呼吸でミストを吸うと、約10～20μmの細かい粒子がのどの奥まで届きます。

1 喉頭部を湿らせる場合

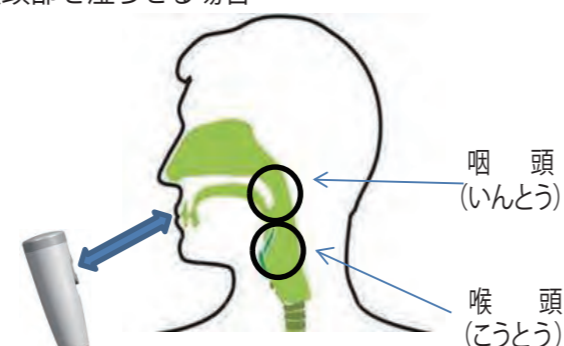

2 鼻粘膜を湿らせる場合

ゆっくりとした呼吸のはやさを繰り返してください。

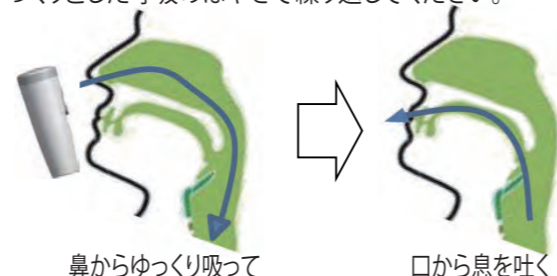

- しばらく使用して効果があらわれない場合 医師または専門家に相談してください。

故障かな?と思ったとき

動かない、噴霧の出が悪い

- ミスト吹出口を下にして、軽く振ってください。ミスト吹出口の裏側に気泡がたまる場合があり、軽く振ることで気泡が抜けやすくなります。
- 電池の消耗が考えられます。新しい電池と交換してください。
- 電池の入れる方向、下部フタの縦線と本体の印が合っているか確認してください。
- ノズル穴のつまりが考えられます。綿棒でやさしくふいてください。強くふくと故障します。

点検後なお異常がある

使用を中止

お願い

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

- しばらく使用して効果があらわれない場合 医師または専門家に相談してください。

廃棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

定格・仕様

販売名	超音波吸入器 NK8020
定格	DC3V 0.7W (単4形アルカリ乾電池×2本)
類別	機械器具76医療用吸入器
一般的名称	家庭用超音波吸入器 (JMDNコード:71020000)
医療機器の種類	管理医療機器
噴霧量	1.2～2.3mL/分
粒子径	10～40μm
本体寸法	奥行41×幅41×高さ112mm
質量	約54g(乾電池除く)
医療機器認証番号	227AKBZX00062000
製造販売元	日光精器株式会社 滋賀県近江八幡市馬淵町2660
製造元	日光精器株式会社 滋賀県近江八幡市馬淵町2660
製造国	日本

5 使い終わったら

※本体は水洗いできません。

- 1 スwitchをOFFにし、給水タンクの水を捨ててください。
- 2 よく水気を切ってから上部フタを閉めてください。
- 3 必ずスイッチがOFFであることを確認してください。

※スイッチがONのままだと、電池が消耗し故障の原因にもなります。

※約3ヶ月以上使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。

お手入れ

本体の汚れはぬるま湯を含ませた布で拭いてください。

- シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色の原因になります。
- 本体は水洗いしないでください。

携帯するときは

- 必ず上部フタを閉めてください。水漏れの防止とタンクへの異物の浸入の防止になります。
- ノズル穴から水が漏れる場合があるので、気になる方はビニール袋に入れて携帯してください。

故障をふせぐために



ご注意

その1 薬液の吸入には使えますか?

故障の原因となるため、新しい水道水以外は使用しないでください。

体調不良やノズル穴づまり、材料劣化等のトラブルが発生するおそれがあります。

その2 市販のペットボトルの水や井戸水は使えるの?

故障の原因となるため、使用しないでください。

毎回新しい水道水を使用してください。ミネラル分の多い水の場合、ノズル穴が詰まるおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より5年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常又は故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理をいたします。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。下記までご連絡ください。

補修用性能部品の保有期間について

日光精器株式会社ではこの超音波吸入器の補修用性能部品の、製造打ち切り後5年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

上部フタや下部フタを紛失された場合は、下記までご連絡ください。上部フタは350円(送料込)、下部フタは250円(送料込)でお送りします。

カタログハウス商品ご相談課

☎ 0120-701-567
月曜～金曜 午前9時～午後7時、土曜 午前9時～午後6時
日・祝休み

無料修理規定

- 1 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4 ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、日光精器株式会社サービス窓口へご相談ください。
- 5 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷 (例:業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ、破損、損失
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書記入内容)は、保管期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、日光精器株式会社サービス窓口にお問い合わせください。